



Karta Zębów

Zęby Akrylowe
Ivostar®/Gnathostar®

Zęby przednie

Ivostar®

Górne



Dolne



Zęby boczne

Gnathostar®



Kształty

Dostępna jest szeroka gama zębów przednich Ivostar – 15 górnych i 6 dolnych oraz 5 górnych i 5 dolnych zębów bocznych Gnathostar.

Zęby przednie oferowane są w trzech różnych kształtach: trójkątne, kwadratowe, owalne w wielkościach od małych do dużych.

Kolory

Zęby dostępne są wg kluczy kolorów:

- Chromascop
- Bleach (4 kolory do zębów wybielanych)
- A –D (klasyczny kolornik od A1 do D4)

Kolornik Chromascop zawiera 20 kolorów opracowanych w oparciu o sprawdzoną, przetestowaną koncepcję kolorów dentynowych – Ivoclar Vivadent.

Z tego powodu kolornik Chromascop jest idealnym rozwiązaniem w celu określenia koloru zębów w przypadku wykonywania uzupełnień z materiałów Ivoclar Vivadent.

Dotyczy to uzupełnień bez podbudowy metalowej, IPS Empress oraz protez ruchomych częściowych i przypadków bezzębia.

Budowa warstwowa

Zęby Ivostar/Gnathostar charakteryzują się zharmonizowaną budową warstwową, co sprawia, że posiadają wygląd bardzo zbliżony do zębów naturalnych.

Tabela porównawcza zębów

Kształty	Górne	Dolne	Zęby przednie
▲	31	13/14	D80/D82/D86
	32	15/11	D88 / D84
	33	11/15	D84
	34	15/14	D84 / D88
	35	16/15	D88 / D84
■	41	14	D80 / D86
	42	15	D84 / D88
	43	16	D88
	44	14/15	D88
	45	16	D88
●	01	12/13	D80 / D82
	02	12/13	D80 / D82
	03	15/11	D84
	04	11/15	D84
	05	11/15	D84 / D88

Ivostar® / Gnathostar®

Dobór zębów

Istnieje wiele sposobów doboru kształtu zębów w oparciu o różne parametry takie jak: kształt twarzy, budowa ciała, cechy charakterystyczne płci. Nawet wtedy gdy nie są dostępne informacje odnośnie kształtu, rozmiaru oraz ustawienia zębów, możemy ustalić te dane na podstawie kształtu żuchwy. Spośród wielu kształtów żuchwy możemy wyodrębnić trzy podstawowe:


- trójkątny
- kwadratowy
- owalny

Dopasowując zęby Ivoclar Vivadent do tych trzech grup ze względu na ich anatomiczny kształt otrzymamy przedstawioną klasyfikację.

Zęby dolne zostały dobrane do górnych w taki sposób jak jest to przedstawione w Karcie zębów i opisane w Tabeli porównawczej.

Kolory zębów zostały podzielone chromatycznie na 5 grup i uporządkowane numerycznie zgodnie z intensywnością odcienia. Kolornik Chromascop służy jako ujednolicony standard w odniesieniu do wszystkich produktów Ivoclar Vivadent.


Kształt trójkątny

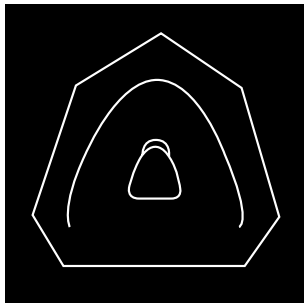

31, 32, 33, 34, 35.

Ta grupa zębów charakteryzuje się „odmłodzonym” kształtem korony, zwiężającym się w kierunku szyjki. Wypukłość korony w obszarze przedśionkowym jest wydatnie zarysowana. Duże siekacze przyśrodkowe mają lekko trójkątny kształt. Grzbiet wyrostka jest również trójkątny i najczęściej świadczy to, o tym, że mamy do czynienia ze zryzem krzyżowym.


Kształt kwadratowy

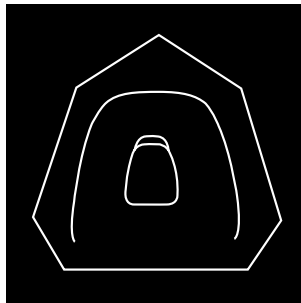

41, 42, 43, 44, 45.

Zęby z tej grupy charakteryzują się kształtem zbliżonym do kwadratu, siekacze przyśrodkowe lekko dominują w odcinku przednim. Płaszczyzna przedśionkowa jest umiarkowanie wypukła. Szczyt wyrostka zębodołowego jest zbliżony kształtem do kwadratu i sugeruje że mamy do czynienia ze zryzem standardowym.

Kształt owalny

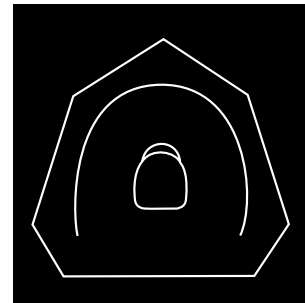


01, 02, 03, 04, 05.

Ta grupa zębów jest anatomicznie charakterystyczna pod względem wyraźnej wypukłej płaszczyzny przedśionkowej. Owalny kształt wyrostka zębodołowego wskazuje na tendencję do zgrzyz głębokiego.



FormSelector.
Łatwiejszy dobór kształtu

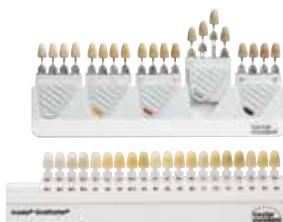

Kolory: Zęby Ivostar/Gnathostar są dopasowane do kolornika Chromascop i/lub do kolornika Ivostar/Gnathostar



CE 0123

© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
pl/2013-06-18

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
Polska
Tel. +48 22 635 54 96
Fax +48 22 635 54 69
www.ivoclarvivadent.pl

ivoclar
vivadent
passion vision innovation