

Przed zastosowaniem wyrobu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej www.wiedent.com.pl w zakładce oferta/zęby akrylowe/Zęby akrylowe Estetic.

Przeznaczenie

Zęby akrylowe ESTETIC to wyrób medyczny klasy I przeznaczony do wykonywania protez ruchomych (wyjmowanych).

Opis

Zęby akrylowe ESTETIC zbudowane są z trzech warstw: szyjki, dentyny i szkliwa naśladując budowę zębów naturalne. Warstwa szyjki jest najbardziej miękka w celu zapewnienia elastyczności właściwego połączenia zęba z płytą protezy. Najtwardszą warstwą jest zewnętrzna warstwa szkliwa, jej twardość jest zbliżona do twardości zębów naturalnych. Zęby ESTETIC, podobnie jak zęby naturalne, mają efekt fluorescencyjny. Są produkowane w 62 fasonach przednich górnych i dolnych oraz bocznych górnych i dolnych w dwóch gamach kolorystycznych - uniwersalnej V (16 kolorów) A1 - D4 oraz WIEDENT (13 kolorów) A1-R5. 14 wybranych fasonów jest produkowanych w dwóch wybielonych kolorach uniwersalnej gamy V - 0M1 i 0M3. Oferowany asortyment umożliwia uzupełnienie wszelkiego rodzaju ubytków w uzębieniu pacjentów zarówno pod względem kształtu jaki barwy. Zęby ESTETIC spełniają wymagania norm międzynarodowych EN ISO 22112 i EN ISO 7491.

Surowce użyte do produkcji

Zęby akrylowe ESTETIC są produkowane z proszków - polimerów na bazie metakrylanu metylu i metakrylanu allilu zawierających nadtlenek benzoilu (PMMA) oraz pigmentów, a także z płynów - monomeru metakrylanu metylu (MMA) i dimetakrylanu 1,4 butandiolu (1,4 BDDMA).

Sposób postępowania

W celu zapewnienia dobrego łączenia zęba z masą na płycie protez, zęby akrylowe boczne posiadają głęboki relief poprzeczny.

W przypadku konieczności zeszlifowania tego reliefu zaleca się wykonanie retencji. Przed osadzeniem zębów w masie na płycie protez należy usunąć воск wrzątkiem oraz odtłuścić ząb monomerem akrylowym. Zęby wytrzymują temperaturę do 100°C i po procesie polimeryzacji przy łączeniu z masą na płycie protez zachowują powierzchnię błyszczącą, dającą się łatwo polerować.

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności

- zagrożeniem dla protetyka może być wdychanie pyłu podczas szlifowania zębów,
 - przy tych pracach zaleca się stosowanie wyciągu i maski przeciwpyłowej.
- Producent zaleca umieszczenie w instrukcji dla pacjenta następujących wskazówek:
- protezy zębowe wykonane z zębów akrylowych stosowane przez pacjenta niezgodnie z przeznaczeniem mogą stworzyć zagrożenie dla jego zdrowia ponieważ tak jak zęby naturalne są podczas użytkowania narażone na ścieranie powierzchni, ukruszenie lub całkowite wyłamanie z protezy,
 - ruchome protezy zębowe wykonane z zębów akrylowych należy wyjmować z jamy ustnej na przerwę nocną,
 - protezy zębowe należy myć szczoteczką do zębów używając pasty do zębów lub innych środków specjalnie przeznaczonych do pielęgnacji protez,
 - protez zębowych nie należy moczyć w substancjach silnie alkalicznych lub kwaśnych aby uniknąć uszkodzenia powierzchni,
 - protezy zębowe, które uległy uszkodzeniu, może naprawiać wyłącznie protetyk lub lekarz stomatolog,
 - należy okresowo sprawdzać dopasowanie protez zębowych,
 - protezy zębowe nie nadające się do dalszego użytku nie wymagają specyficznego traktowania, nadają się do recyklingu i mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi.

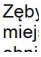


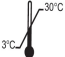




Warunki przechowywania i transportu

Zęby akrylowe ESTETIC należy przechowywać w suchym i czystym miejscu. Podczas przechowywania i transportu należy zachować temperaturę od 3 do 30°C oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Zęby akrylowe ESTETIC trzeba zużyć w czasie nie dłuższym niż 10 lat od wyprodukowania, szczególnie ze względu na możliwe obniżenie jakości opakowania.

Podstawa prawna

Zęby akrylowe Estetic spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745.

Stosowane symbole

-  Wytwórca
-  Przestrzegać instrukcji używania
-  Znak zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745.
-  Ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania
-  Chronić przed światłem słonecznym
-  Produkt jest wyrobem medycznym
-  Nr serii
-  Termin ważności